



Globulki  
dopochwowe  
z kwasem  
hialuronowym  
i propolisem

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

### 1. Opis produktu

Apivaginal z kwasem hialuronowym i propolisem to wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych.

1 globulka zawiera: 13 mg kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (*sodium hyaluronate*) oraz 65 mg propolisu w postaci etanolowego ekstraktu propolisu (*ethanolic extract of propolis*).

Po założeniu globulki do pochwy następuje jej rozpuszczenie w wyniku czego tworzy się żel działający nawilżająco i ochronnie.

---

### 2. Wykaz składników

Sól sodowa kwasu hialuronowego, etanolowy ekstrakt propolisu, glikole polioksyetylenowe.

---

### 3. Opis działania

Globulka po rozpuszczeniu w pochwie tworzy lepki hydrożel, który działa powlekająco na błony śluzowe.

Kwas hialuronowy łączy się z wydzieliną błon śluzowych pochwy tworząc na ich powierzchni żelową powłokę. Warstwa ta:

- ma działanie nawilżające;
  - wspomaga powrót nabłonka pochwy do stanu fizjologicznego;
  - działa ochronnie, stanowi zabezpieczenie błon śluzowych przed podrażnieniami;
  - tworzy warunki sprzyjające aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych.
- 

### 4. Przeznaczenie

Wyrób medyczny przeznaczony jest do:

- łagodzenia dolegliwości w okolicach warg sromowych i pochwy takich jak: suchość, świąd, podrażnienia, pieczenie, zaczerwienie;
  - stosowania po zabiegach i operacjach ginekologicznych.
- 

### 5. Sposób użycia

Stosować jedną globulkę dziennie, na noc przez 5 dni, do momentu złagodzenia dolegliwości w pochwie lub okolicy sromu.

W celu wyjęcia globulki z folii należy:

- oddzielić jedno gniazdo poprzez przerwanie perforacji;
- rozchylić listki folii i ostrożnie rozwierać części folii na zewnątrz;
- wyjąć globulkę i od razu wprowadzić do pochwy.

Zakładanie globulki najlepiej wykonywać w pozycji leżącej na plecach, z lekko uniesionymi w górę udami.



## 6. Ostrzeżenia

Na czas trwania kuracji nie należy podejmować współżycia płciowego. Stosowanie globulek należy zaplanować tak, by nie zostało przerwane menstruacją.

U kobiety w ciąży i matek karmiących przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.

Jeśli po zastosowaniu produktu wystąpiło nasilenie zmian lub pojawił się wyprysk, obrzęk, bądź inne nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy sromu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.

Jeśli po zastosowaniu produktu nastąpi złagodzenie zmian, jednak po 5 dniach nieprawidłowości powrócą, nie należy wznawiać stosowania produktu, lecz zwrócić się do lekarza.

Nie stosować produktu z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Uwaga! W celu uniknięcia ewentualnych zabrudzeń bielizny i utrzymania prawidłowej higieny zaleca się stosowanie wkładek higienicznych w trakcie kuracji.

Nie używać w przypadku uszkodzenia którejkolwiek części opakowania.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

## 7. Przechowywanie

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła.

## 8. Opakowanie

Opakowanie zawiera 5 globulek.

## 9. Wytwórca



FARMINA SP. Z O.O.  
UL. LIPSKA 44  
30-721 KRAKÓW  
[www.farmina.pl](http://www.farmina.pl)

Data aktualizacji instrukcji użytkowania: 01.2019

WYRÓB MEDYCZNY

