



Vaginální
globule
s kyselinou
hyaluronovou
a propolisem

PŘÍBALOVÝ LETÁK

1. Popis výrobku

Apivaginal s kyselinou hyaluronovou a propolisem je zdravotnický prostředek ve formě vaginálních globulí.

1 globule obsahuje: 13 mg kyseliny hyaluronové v podobě sodné soli (*sodium hyaluronate*) a 65 mg propolisu v podobě etanolového extraktu propolisu (*ethanolic extract of propolis*).

Po zavedení globule do pochvy dochází k jejímu rozpouštění, v důsledku toho vzniká gel, který má ochranný a hydratační účinek.

2. Přehled složek

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, etanolový extrakt propolisu, polyoxyethylenglykol.

3. Popis účinku

Globule po rozpuštění v pochvě vytváří viskózní hydrogel, který pokrývá sliznice. Kyselina hyaluronová se váže na sekret sliznic pochvy a vytváří na jejich povrchu gelový povlak. Tato vrstva:

- má hydratační účinek;
 - podporuje návrat výstelky pochvy do fyziologického stavu;
 - má ochranný účinek a chrání sliznice proti podráždění;
 - vytváří podmínky přispívající k aktivaci přirozených regeneračních mechanismů.
-

4. Určení

Zdravotnický prostředek je určen k:

- zmírnění obtíží v oblasti stydkých pysků a pochvy, jako: suchost, svědění, podráždění, pálení, zarudnutí;
 - použití po gynekologických zákrocích a operacích.
-

5. Způsob použití

Používejte jednu globuli denně, na noc, po dobu 5 dní až do doby odeznění obtíží v pochvě nebo intimní oblasti.

Vyjmutí globule z obalu:

- odtrhněte jednu globuli v místě perforace obalu;
- oddělte od sebe obě části fólie a opatrně rozevírejte směrem od sebe;
- vyjměte globuli a ihned ji zaveďte do pochvy.

Vhodnou polohou pro zavedení globule je poloha vleže na zádech, s mírně pokrčenými koleny.



6. Upozornění

Během léčby vaginálními globulami se vyhněte pohlavnímu styku. Použití globulí je nutné naplánovat tak, aby nebylo přerušeno menstruací.

U těhotných a kojících žen je nutné použití globulí konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku výrobku.

Pokud po použití výrobku dojde ke zhoršení příznaků nebo se objeví vyrážka, otok nebo jiné, dříve nepocítované obtíže v intimní oblasti, přerušte jeho používání a vyhledejte lékaře.

Pokud po použití výrobku dojde ke zmírnění příznaků, ale po 5 dnech se příznaky objeví znovu, nepoužívejte výrobek opakovaně, ale vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte současně s jinými výrobky určenými k vaginálnímu použití.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pozor! Aby nedocházelo k případnému znečištění spodního prádla a za účelem udržení hygieny je vhodné během léčby používat slipové vložky.

Nepoužívejte v případě poškození jakékoli části obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

7. Skladování

Výrobek skladujte v originálním obale při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

8. Balení

Balení obsahuje 5 globulí.

9. Výrobce



FARMINA SP. Z O.O.

UL. LIPSKA 44

30-721 KRAKÓW

POLSKO

www.apivaginal.com

Datum poslední revize: 08.2020

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

