



*Gel
s kyselinou
hyaluronovou
a propolisem*

PŘÍBALOVÝ LETÁK

1. Popis výrobku

Apivaginal gel je zdravotnický prostředek v podobě mukoadhezivního gelu k použití na vnější ženské pohlavní orgány (stydské pysky, poševní předsíň). Apivaginal gel zvlhčuje sliznici, zmenšuje podráždění a zmírňuje příznaky zánětlivých stavů.

2. Složení

Čištěná voda, glycerol, propylenglykol, triethanolamin, carbomer, kyselina mléčná, etanolový extrakt propolisu, sodná sůl kyseliny hyaluronové.

3. Popis účinku

Apivaginal při kontaktu se sliznicí intimních partií vytváří ochrannou vrstvu s hydratačními a vysoce zvláčňujícími vlastnostmi. Přispívá k procesu regenerace tkání. Podporuje proces návratu sliznic pochvy a kůže stydkých pysků k přirozenému fyziologickému stavu.

4. Určení

Apivaginal gel je určen k:

- zmírnění obtíží v oblasti stydkých pysků a poševní předsíně, jako: svědění, otok, zarudnutí;
 - použití za účelem obnovy fyziologického stavu kůže v oblasti vnějších pohlavních orgánů.
-

5. Způsob použití

Malé množství gelu naneste na sliznici poševní předsíně a stydkých pysků. V závislosti na intenzitě obtíží používejte nepřetržitě 1-3krát denně, až do doby odeznění obtíží, avšak nejdéle 10 dní.

6. Upozornění

Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku výrobku.

U těhotných a kojících žen je nutné použití gelu konzultovat s lékařem.

Pokud obtíže neustoupí po 10 dnech léčby nebo pokud po použití gelu dojde ke zhoršení příznaků nebo se objeví vyrážka, otok nebo jiné, dříve nepocítované obtíže v intimní oblasti, přerušete jeho používání a vyhledejte lékaře.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pozor! Výrobek může znečistit spodní prádlo, při používání je vhodné nosit slipové vložky.

Nepoužívejte gel s jinými výrobky aplikovanými na vnější pohlavní orgány.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

7. Skladování

Výrobek skladujte na tmavém místě při teplotě do 25 °C.

8. Balení

Balení obsahuje 20 g gelu.

9. Výrobce



FARMINA SP. Z O.O.

UL. LIPSKA 44

30-721 KRAKÓW

POLSKO

www.apivaginal.com

Datum poslední revize: 08.2020